

10분 이내 결과 확인 | 고민감도(낮은 검출 한계) | Competitive 방식

본 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 숙지하시고 사용하기 바랍니다.

BAROS-N1 마약류 검사키트는 의심되는 미지시료(물, 주류, 음료, 음식, 분말 등)에서 대마의 주요 마약성분인 tetrahydrocannabinol(THC), 코카인 cocaine(COC), 모르핀 morphine(MOR/OPI), 졸피뎀 zolpidem(ZOL), 필로폰 마약의 주성분인 methamphetamine(MET)와 의약품 마취제인 케타민 ketamine(KET) 등의 마약류를 개별검사 방식으로 판별하는 면역기반의 신속검사 키트입니다. 본 검사 키트는 주요 마약들의 특이항체를 사용하여 검출 감도가 높고 면봉으로 시료를 채취하여 10분 이내에 결과를 쉽게 확인할 수 있습니다.

구성품



BAROS-N1 사용 가이드

5-step usage guide: 1. 동봉된 면봉을 꺼내 의심되는 분말, 액체류, 음식 등에 일회용 면봉을 이용하여 검체를 채취합니다. 2. 시료가 묻은 면봉을 버퍼용기에 넣고 잘 섞은 후 버퍼용기의 양 옆을 눌러 면봉을 짜내듯이 꺼냅니다. 3. 버퍼용기 상부에 노즐필터캡을 결합시키고 꼭 눌러 줍니다. 4. 카세트 S(Sample) 주입구에 용액을 3~4 방울 떨어 뜨립니다. 5. 약 10분 후 테스트 결과를 확인할 수 있습니다.

검사결과 판독

BAROS-N1 검사결과는 아래와 같이 판독하시면 됩니다. 대조선과 검사선으로 구성되어 있으며 각 타겟 마약 유무에 따라 아래와 같이 판독합니다.



양성



검사선이 발색되지 않은 경우

검출한계 이상의 마약 농도가 검출된 경우로 인체에 해로운 양의 마약이 존재하고 있습니다

음성



대조선과 검사선이 모두 발색된 경우

마약이 존재하지 않는 경우로 안심하셔도 좋습니다.

재검사



대조선이 발색되지 않은 경우

테스트가 정상적으로 이뤄지지 않은 경우로 재검사가 필요합니다.

※ 30분 이후의 결과는 신뢰하지 않습니다.

주의사항



- 1. 본 제품을 마약물질 검사 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.
2. 소아나 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 사용 시 사용기간, 파손 및 변질 여부를 확인하시고 사용하십시오.
4. 평평한 곳에 카세트를 놓고 검사를 진행하시고, 버퍼용기를 수직으로 잡고 천천히 떨어뜨리십시오.
5. 30분 이후에 나온 결과는 신뢰할 수 없습니다.
6. 밝은 곳에서 검사용 디바이스를 가까이 보고 결과를 확인하십시오.
7. 색 구분에 어려움이 있거나 시력이 낮은 사람은 결과 확인이 어려울 수 있습니다.